

**Contour**  
Evolving with you

# Nøjagtig og enkel blodsukkermåling med CONTOUR®NEXT



**Contour**  
**next**  
System til måling af blodsukker

**ASCENSIA**  
Diabetes Care

# CONTOUR®NEXT

## Blodsuktermåling på 1, 2, 3



Blodsukkerapparatet er klar til brug direkte fra æsken. Vask dine hænder og tør dem grundigt, inden du måler dit blodsukker.

1



Indsæt teststrimlen med den grå firkantede ende i teststrimmelporten. Det vil automatisk tænde apparatet.

2



Frembring en bloddråbe med fingerprikkeren, og lad bloddråben blive suget ind i spidsen på teststrimlen.

Med **Second-Chance®** fyldning har du mulighed for at påføre mere blod inden for 60 sekunder, hvis første bloddråbe ikke var stor nok.

3



Dit resultat bliver vist efter 5 sekunder, og **smartLIGHT®**funktionen angiver om dit resultat er over, under eller indenfor målområde. Resultatet bliver automatisk gemt i apparatet.



**Contour**  
**next**

System til måling af blodsukker

# SmartLIGHT®funktion



Den tydelige **smartLIGHT®funktion** viser dig, hvordan resultatet ligger i forhold til dit målområde. Alle målområderne er forudindstillet. Ved behov kan du ændre indstillingen til dine personlige mål efter aftale med din behandler.



**Gul**  
Over  
målområde



**Grøn**  
Indenfor  
målområde



**Rød**  
Under  
målområde

Det overordnede  
mål er forudindstillet  
til 3,9-10,0 mmol/L

## CONTOUR®DIABETES app



- Trådløs overførsel fra dit CONTOUR®NEXT apparat til **CONTOUR®DIABETES app**
- Giver enkelt overblik og hjælper dig med at se sammenhænge i dine blodsukkerresultater
- Gør det nemt at dele, sende og udskrive dine blodsukkerrapporter



Download gratis  
**CONTOUR®DIABETES app**



# CONTOUR®NEXT målesystem tilbyder:

- smartLIGHT®funktion
  - Enkel blodsuktermåling
  - Nøjagtige resultater
  - Lille blodmængde på 0,6 µl
  - Måletid på 5 sekunder
  - Second-Chance®  
fyldning i op til 60 sek.
- Trådløs overførsel til gratis  
CONTOUR®DIABETES app
  - Hukommelse på 800 målinger
  - Blodsukker gennemsnit  
7, 14, 30 og 90 dage
  - Måltidsmarkeringer før-  
og efter måltid
  - Påmindelser efter måltider



**ASCENSIA**  
Diabetes Care

**Ascensia Diabetes Care Denmark ApS**  
Tlf. 4282 8000  
diabetesdk@ascensia.com

Klik ind på [www.diabetes.ascensia.dk](http://www.diabetes.ascensia.dk)  
eller [www.facebook.com/livetmeddiabetes](http://www.facebook.com/livetmeddiabetes)  
for yderligere information

**Contour**  
**next**  
System til måling af blodsukker

Ascensia, Ascensia Diabetes Care logoet, Contour, Second-Chance, smartLIGHT og Ingen Kodning er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende Ascensia Diabetes Care Holdings AG. 2024 © Ascensia Diabetes Care